


MAD Nasal


Intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Anwendung des intranasalen mukosalen Medikamentenzerstäubers MAD Nasal*


Anwendung

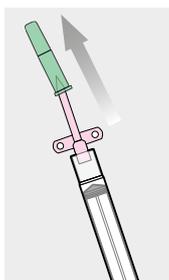


1 Nehmen Sie die grüne Kappe des Entnahmespikes für das Durchstechfläschchen ab und werfen Sie sie weg.

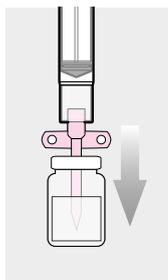


2 Stechen Sie den Entnahmespike an der Spritze in das Durchstechfläschchen mit dem Medikament.

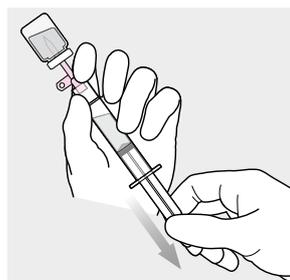


3 Ziehen Sie die geeignete Arzneimittelmenge auf, die zur Behandlung des Patienten benötigt wird (einschließlich einer bestimmten Arzneimittelmenge zur Einbeziehung des Totraums im MAD Nasal).

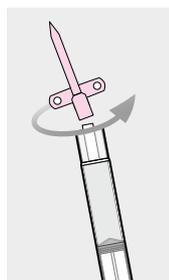

4 Nehmen Sie die Spritze (in einer Drehbewegung) von dem Entnahmespike ab.

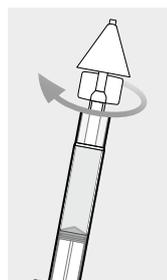


5 Setzen Sie den MAD Nasal über den Luer-Lock-Konnektor auf die Spritze auf.

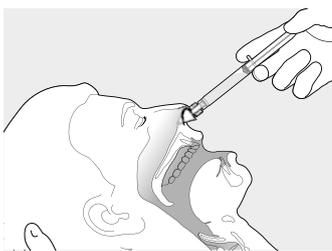

6 Halten Sie den Hinterkopf mit der freien Hand in stabiler Position und halten Sie die Spitze des MAD Nasal fest gegen das Nasenloch, sodass sie leicht nach oben und außen zeigt (zur Oberseite des Ohres).



7 Drücken Sie den Spritzenkolben zügig nach unten, um die Hälfte des Arzneimittels im Nasenloch freizusetzen.

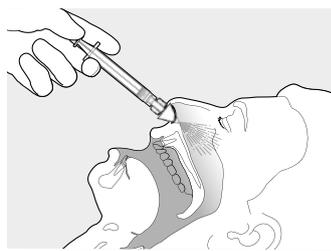

8 Setzen Sie den MAD Nasal am gegenüberliegenden Nasenloch an und verabreichen Sie, je nach Indikation, unter Wiederholung der Schritte 6 und 7 das restliche Arzneimittel in das Nasenloch.

Technische Daten des intranasalen mukosalen Medikamentenzerstäubers MAD Nasal

Typische Partikelgröße	30 – 100 Mikron
Totraum des Systems	MAD100/MAD140 = 0,12 ml MAD100OS/MAD140OS = 0,13 ml MAD110/MAD110OS = 0,15 ml MAD130/MAD130OS = 0,15 ml MAD300 = 0,06 ml
Spitzendurchmesser	4,3 mm (0,17 Zoll)

Für weitere Informationen besuchen Sie Imaco.com/products

*Zur Verwendung mit Arzneimitteln, die für die intranasale Verabreichung zugelassen sind.

Teleflex, das Teleflex-Logo, MAD und MAD Nasal sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Dokument sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter.

Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (09/2020). Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2020 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

MCI-1000029-DE · REV 1 · 10 20 PDF

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich · Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika · Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com

Tipps zur erfolgreichen Anwendung

1. Minimale Menge, maximale Konzentration

- Adäquat konzentriertes Arzneimittel verwenden

2. Absorptionsfläche der Schleimhaut maximieren

- Arzneimittel zerstäuben (nicht tropfen), um breiteren Oberflächenbereich zu erfassen
- In BEIDE Nasenlöcher injizieren, um die Absorptionsfläche zu verdoppeln
- Leicht nach oben und außen richten, um Nasenmuschel und Rienschleimhaut zu erfassen

3. Auf abnormale Schleimhautmerkmale achten

- Schleim, Blut und Gefäßverengungen (Vasokonstriktionen) beeinträchtigen die Absorption
- Nasenlöcher absaugen oder alternative Arzneimittelverabreichungsmethode in Betracht ziehen



MAD Nasal mit Entnahmespike für das Durchstechfläschchen und 1 ml (oder 3 ml) Spritze

